

000/0070.012/20

## Ycla, lotion pour les yeux (200ml)

compatible avec la station oculaire MExT,  
pour les **soins oculaires complets**



L'Ycla est un flacon d'irrigation déjà rempli de NaCl – chlorure de sodium –, qui est le nettoyant le plus efficace pour toutes sortes d'irritations des yeux. Aussi disponible en forme d'ampoule (5x20ml).



### Propriétés

- Contenu: 200 ml.
- Le capuchon peut être placé directement sur l'oeil. Produit individuel (bouteille).
- Valeur pH: 5.0-6.0.

### Applications

- Lavage de particules de fer, poussières, bois, etc.
- Lavage efficace de produits chimiques.
- Effet apaisant sur les yeux en cas d'irritations.

### Utilisation

- Tenir le flacon à la verticale et retirer le capuchon.
- Tourner le couvercle de 360° et rincer l'œil abondamment.
- Presser le flacon légèrement pour assurer un jet doux et régulier.
- Consulter toujours un médecin.



## Contenu

Bouteille 1 oeil

## Préservation

- Stockage des bouteilles à l'envers: permet de savoir immédiatement si une bouteille est déjà ouverte.
- Date d'expiration: 3.5 ans après la date de fabrication.
- Produit individuel: voir emballage.
- Conserver à température ambiante (5°C - 40°C).

L'Ycla est un dispositif médical.

**Version: 22/07/2021**