

000/0070.014/20



Ycla Neutral, substance neutralisante pour rinçage oculaire (200ml)

compatible avec la [station oculaire MExT](#), pour les **soins oculaires complets**

Ycla Neutral est un flacon pour rinçage oculaire contenant une solution de phosphate indiquée pour neutraliser rapidement et efficacement les bases et acides forts.



Propriétés

- Contenu: 200 ml.
- Les bases et acides forts peuvent abîmer la cornée de l'oeil dans les 45 secondes.
- Ycla Neutral neutralise ces bases et acides endéans les 20 secondes.
- Le liquide se compose de phosphate de sodium, également présent à l'état naturel dans le corps.
- La concentration en sodium de Ycla Neutral coorespond à 2,5 fois de la concentration moyenne du liquide oculaire.
- En cas d'accident avec un acide ou une base le liquide oculaire peut ainsi être neutralisé.
- Rapide et simple à utiliser.
- Efficace et sans risque de lésion supplémentaire.

Applications

- En cas de contact des yeux avec une base ou un acide.
- Pour neutraliser le liquide d'agression oculaire le plus rapidement possible et le ramener à un niveau normal de 7,4.
- Ycla Neutral est également efficace pour les lésions par acide ou base sur d'autres parties

du corps.

Utilisation

- Retirer le capuchon.
- Tenir le flacon droit et tourner le couvercle de 360°.
- Rincer délicatement l'œil jusqu'à ce que le flacon soit vide.
- Presser le flacon légèrement.
- Poursuivre avec un produit de rinçage oculaire standard, par exemple [Ycla 200ml](#), jusqu'à l'arrivée des secours.



Contenu

- Flacon

Préservation

- Stockage des bouteilles à l'envers: permet de savoir immédiatement si une bouteille est déjà ouverte.
- Date d'expiration: 3.5 ans après la date de fabrication. Produit individuel: voir emballage.
- Conserver à température ambiante (entre 5° et 35°C).

Ycla Neutral est un dispositif médical.

Version: 22/07/2021