

000/0140.010/20



Bloodstop, spray hémostatique avec m.doc

Bloodstop permet d'arrêter de manière rapide et efficace les saignements superficiels. Bloodstop contient de la poudre hémostatique m.doc, qui transforme le sang excédentaire très rapidement en une couche de gel doux.




Propriétés

- Contenu: 80 ml.
- Spray pour soigner les plaies.
- Arrête les hémorragies en cas de coupures et d'écorchures.
- Ingrédient actif m-doc™ (Microdispersed Oxidised Cellulose).
- Dispositif médical, non stérile.

Utilisation

- Toujours maintenir le flacon en position verticale. Bien secouer. Pulvériser à une distance de 10-15 cm de la peau
- Pulvériser abondamment et directement sur la plaie. Quand le saignement s'arrête, retirer le reste de la poudre et appliquer un sparadrap ou pansement.

Ou pulvériser abondamment sur un sparadrap ou pansement. Ensuite, appliquer le sparadrap ou pansement.

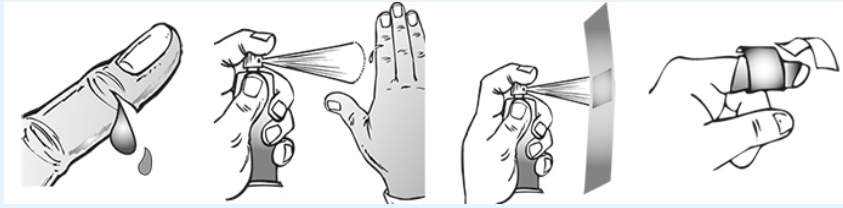

Contenu

- Flacon.

Préservation

- Conserver à température ambiante et dans un endroit sec.
- Date d'expiration:
- 36 mois après la date de fabrication.

Bloodstop est un dispositif médical.

Version: 22/07/2021