

000/0010.011/30



## VFMK Propolis

VFMK Propolis est un pansement pour soigner les petites blessures courantes rapidement et de façon hygiénique. Grâce au système de fixation unique, on peut l'employer dans n'importe quelles conditions de travail. Le Propolis stimule le rétablissement de la peau.



### Propriétés

- Dimensions: 0,05 x 2 m.
- Résiste à la poussière, à l'eau, à la graisse et à l'huile.
- Peut être utilisé pour des brûlures, des coupures, des crevasses ou des contusions superficielles (après les soins appropriés).
- Ne colle ni à la peau, ni à la blessure, ni aux poils.
- Contient du Propolis.
- Peut être déchiré à la main.
- Hypoallergénique.


### Applications

- Pour les doigts et les orteils: Coupures, crevasses.
- Brûlures, ampoules.
- Blessures suturées.
- Ongles incarnés, soins des pieds.
- Contusions.

### Utilisation

- D'abord, nettoyez la blessure avec un tampon hygiénique.
- Déchirez 10 à 15 cm du pansement.
- Enlevez le film protecteur.
- Pincez le pansement sur lui-même pour le fixer autour du doigt.

- Enroulez-le en spirales. Enroulez le bord du pansement pour former une bague de fixation et rabattez la gaze au bout du doigt sur elle-même.
- Pour une utilisation en compresse, pliez la gaze en plusieurs couches et utilisez un fixateur.

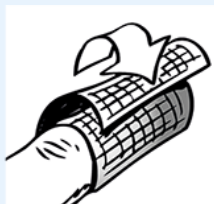

## Contenu

- Boîte 6 pièces.

## Préservation

- Le pansement VFMK Propolis est emballé sous cellophane et livré dans une boîte en polypropylène hermétiquement fermée.
- Après ouverture, il se conserve pendant 12 mois.

VFMK Propolis est un dispositif médical.

**Version: 22/07/2021**