

000/0010.023/30



## ECV5 bleu, pansement élastique cohésif bleu

ECV5 bleu est un pansement de soutien et de fixation qui satisfait à de nombreuses exigences. Le pansement ne se déplace pas et assure une fixation réelle tout en maintenant la mobilité du patient au maximum grâce à son pourcentage élevé de coton. L'ECV5 bleu peut également être utilisé sur des peaux sensibles.



### Propriétés

- Dimensions: 0.05 x 4 m.
- Résistant à la poussière, à l'eau, à la graisse et à l'huile.
- Ne colle ni à la peau, ni à la blessure ni aux poils.
- Peut être réutilisé. Peut être lavé 1 à 2 fois à 40°C sans détergent et sans chlore. Rincer et laisser sécher à plat.
- Garde ses propriétés auto adhérentes au contact de l'eau.
- Se découpe sans ciseaux.
- Est hypoallergénique.
- Est perméable à l'air.
- Couleur bleue : idéal pour l'industrie alimentaire.

### Applications

- Fixation de pansements de toutes sortes et tailles.
- Bandage de fixation avec action de soutien.
- Bandage pour le doigt, le poignet, la tête et l'oreille.
- Sous- bandage qui protège la peau en cas de pansement préventif.
- Le bandage peut être utilisé pour fixer un Cold Pack.
- Grâce à sa perméabilité à l'air, le bandage procure un effet de froid idéal et protège la peau.

## Utilisation

- Utilisez l'élasticité du ECV5 Bleu modérément, car une tension trop excessive pourrait gêner la circulation sanguine.
- Afin d'appliquer le bandage d'une manière correcte, le gaufrage doit toujours rester apparent. Continuez de panser, en couvrant avec chaque tour au moins la moitié du précédent.
- Le dernier tour doit recouvrir complètement le tour précédent et doit être posé sans pression.



## Contenu

- Boîte 4 pièces.

## Préservation

- ECV5 Bleu est emballé sous cellophane UV.
- Conservez-le dans un emballage fermé sous température ambiante, loin des rayons directs du soleil.
- Date d'expiration : 60 mois après la date de fabrication, produit individuel: voir emballage.

ECV5 bleu est un dispositif médical.

**Version: 22/07/2021**